



Tedis Mobil Uygulama Yapısı ve Özellikleri Raporu

İçindekiler

1. Giriş Yap
2. Şifremi Unuttum
3. Sol Menü
4. Profil Detayları
5. Hasta Seç
6. Cihazlar
7. Gözlemler
8. Warfarin Tedavisi
9. Sohbetler
10. Ayarlar
11. Sorun Bildir

1-) Giriş Yap :

- Kullanıcı adı ve şifre ile sisteme güvenli bir şekilde giriş yapılır.

14:15

91



E-posta

Şifre

Giriş Yap

Şifremi unuttum

25.03.24

2-) Şifremi Unuttum :

- Kullanıcı, "Şifremi Unuttum" sayfasından kullanıcı adını girerek şifre sıfırlama bağlantısını talep edebilir. Bu bağlantı, kayıtlı e-posta adresine gönderilir.

14:15



← Şifremi unuttum




Kullanıcı adınızı girdiğinizde, şifre sıfırlama bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.

E-posta

Onayla

3-) Sol menü :

- Sayfalara erişim sağlanır.
- "Çıkış Yap" butonuna tıklanarak giriş sayfasına yönlendirilir.

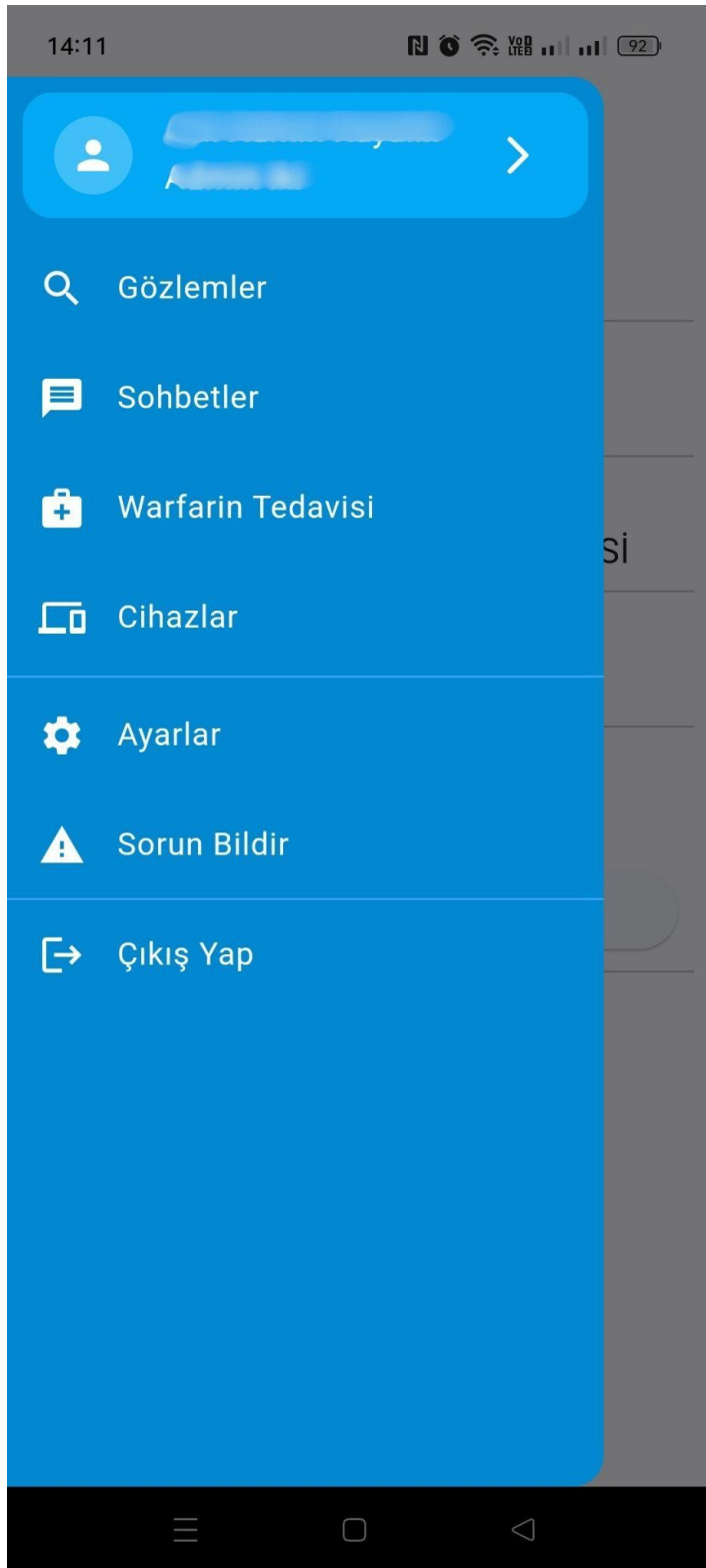

4-) Profil Detayları :

- Giriş yapan kullanıcının hesap detaylarını içerir.
- Doktor girişi için ayrıca hasta seçme alanı bulunmaktadır. Bu alandan, bilgilerine erişilmek istenen hasta listeden seçilir.

14:11

Profil Detayları

Adı
Aslı Admin

Soyadı
Kayaçık Aslı

Kurum
ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ

E-posta
kayaçik.asli@gmail.com

Seçili hasta
Hasta seçilmedi

Hasta seç

14:11

Profil Detayları

Adı
Aslı Admin

Soyadı
Kayaçık Aslı

Kurum
ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ

E-posta
kayaçik.asli@gmail.com

Seçili hasta
Aslı Kayaçık

Hasta seç

- Kullanıcı girişi :

18:55



Profil Detayları

Adı

Aslı Kullanıcı

Soyadı

M. M.

Kurum

SYSTEM

E-posta

as.yalikaci@gmail.com


Telefon

045457



5-) Hasta Seç :

- Listedeki bilgilerine erişilmek istenen hasta seçilir.
- Hasta seçilmediğinde Gözlemler, Warfarin Tedavisi, Cihazlar sayfalarında ekran görüntüsünde belirtilen uyarıyı verir.

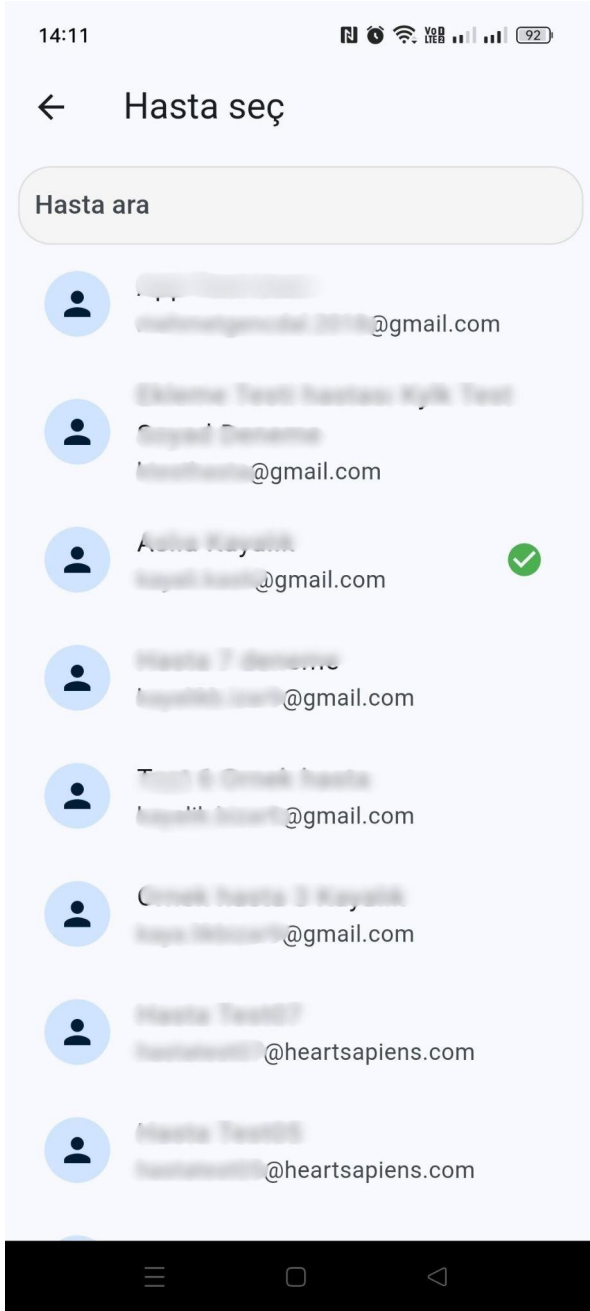

6-) Cihazlar :

- Hastaya takılan mevcut cihazlar(aktif veya pasif), detaylarıyla birlikte listelenir.

14:15



Cihazlar

Sol

Aktif



RELİANTHEART
AVAD



sdadsad
Seri No



30/1/2025
Cihaz Takılma Zamanı



106 Gün
Cihaz Takılı Kalma Süresi

Sol

Pasif



RELİANTHEART
AVAD



4222445
Seri No



20/1/2025
Cihaz Takılma Zamanı

20/1/2025



7-) Gözlemler :

- Yeni bir gözlem değeri eklenebilir. Mevcut gözlem değerleri filtrelemeye uygun olarak listenebilir.
- Eklenen gözlem değeri gözlem zamanı değerinden itibaren bir saat içinde silinebilir. Bu zaman aralığı dışında silinemez.
- Gözlem değeri admin dahil kimse tarafından güncellenmez.
- Gözlem değeri detayı gözlemlenebilir.

14:13

91

≡

Gözlemler

≡

Filtre

Filtreleme yapmak için dokunun

^

Tarih

09.05.2025

17.05.2025

Değer

Büyük

Değer

2

Gözlem tipi

GÖRSEL

INR

DEBİ

✓ WATT

PI

SİSTOLİK BASINÇ

DİASTOLİK BASINÇ

RPM

KİLO

BOY

Filtrele

Tür	Değer	Tarih
WATT	4.0	Bugün 14:12

+ Gözlem Ekle

14:12

91

≡

Gözlemler

≡

Filtre

Filtreleme yapmak için dokunun

∨

Tür	Değer	Tarih
Gözlem yok		

+ Gözlem Ekle

14:12



Gözlem Formu

INR

DEBİ

WATT

4

PI

SİSTOLİK BASINÇ

DİASTOLİK BASINÇ

RPM

KİLO

BOY

 Görsel Ekle

 Kaydet

14:13



Gözlem Detayları

WATT

4.0

14:12 16-05-2025

 Gözlemi sil

14:14

91

Gözlemler

Filtre

Filtreleme yapmak için dokununuz

Tarih

09.05.2025

17.05.2025

Değer

Büyük

Değer

2

Gözlem tipi

GÖRSEL

INR

DEBİ

✓ WATT

PI

SİSTOLİK BASINÇ

DİASTOLİK BASINÇ

RPM

KİLO

BOY

Filtrele

Tür

Değer

Tarih

Gözlem yok

+ Gözlem Ekle

Gözlem silindi

8-) Warfarin Tedavisi:

- Tedaviler, dozlarına ve günlük kullanımlarına göre listelenir.
- Alınan dozlar işaretlenerek kullanıldığı belirtilir.

14:16

VoLTE 91



Warfarin Tedavisi



Mayıs 2025



Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Tedavi Listesi

14:17



Warfarin Tedavisi

< Mayıs 2025 >

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
28	29	30	1	2	3	4
		1		1	1	1
5	6	7	8	9	10	11
1	1	1	1	1	1	1
12	13	14	15	16	17	18
				1	1	1
19	20	21	22	23	24	25
1	K	1				
26	27	28	29	30	31	1

Tedavi Listesi

WARFMADİN 5 MG TABLET, 28
ADET
2.5 mg



14:17



Warfarin Tedavisi

< Mayıs 2025 >

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
28	29	30	1	2	3	4
		1		1	1	1
5	6	7	8	9	10	11
1	1	1	1	1	1	1
12	13	14	15	16	17	18
				1	1	1
19	20	21	22	23	24	25
1	K	1				
26	27	28	29	30	31	1



Tedavi Listesi

WARFMADİN 5 MG TABLET, 28
ADET
2.5 mg



9-) Sohbetler :

- Sohbetler sayfasında doktorlar için hastalar, hastalar için ise çalışma planı bulunan doktorlar listelenir ve mesajlaşmaya olanak sağlar.
- “Toplu mesaj gönder” özelliği ile birden fazla hastaya aynı anda mesaj gönderilebilir.
- “Toplu mesaj gönder” seçeneği, hasta olarak giriş yapan kullanıcılar tarafından görünmez.

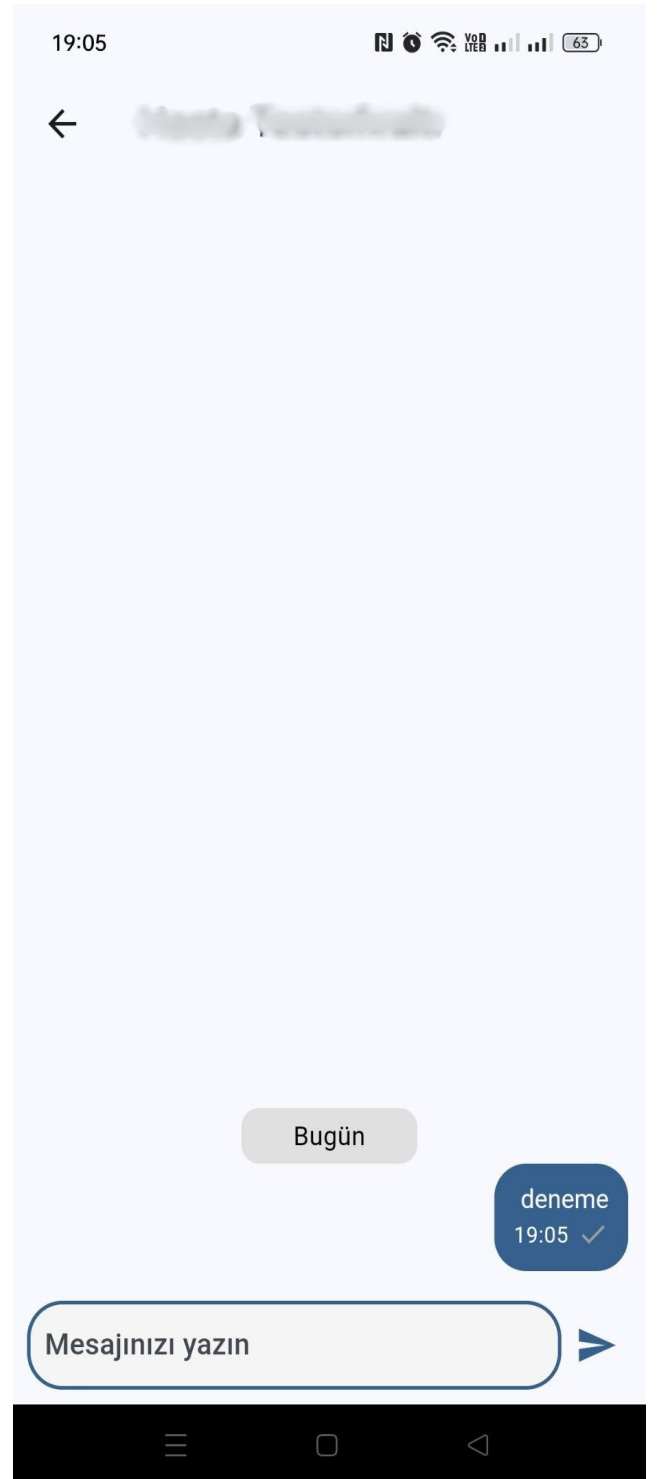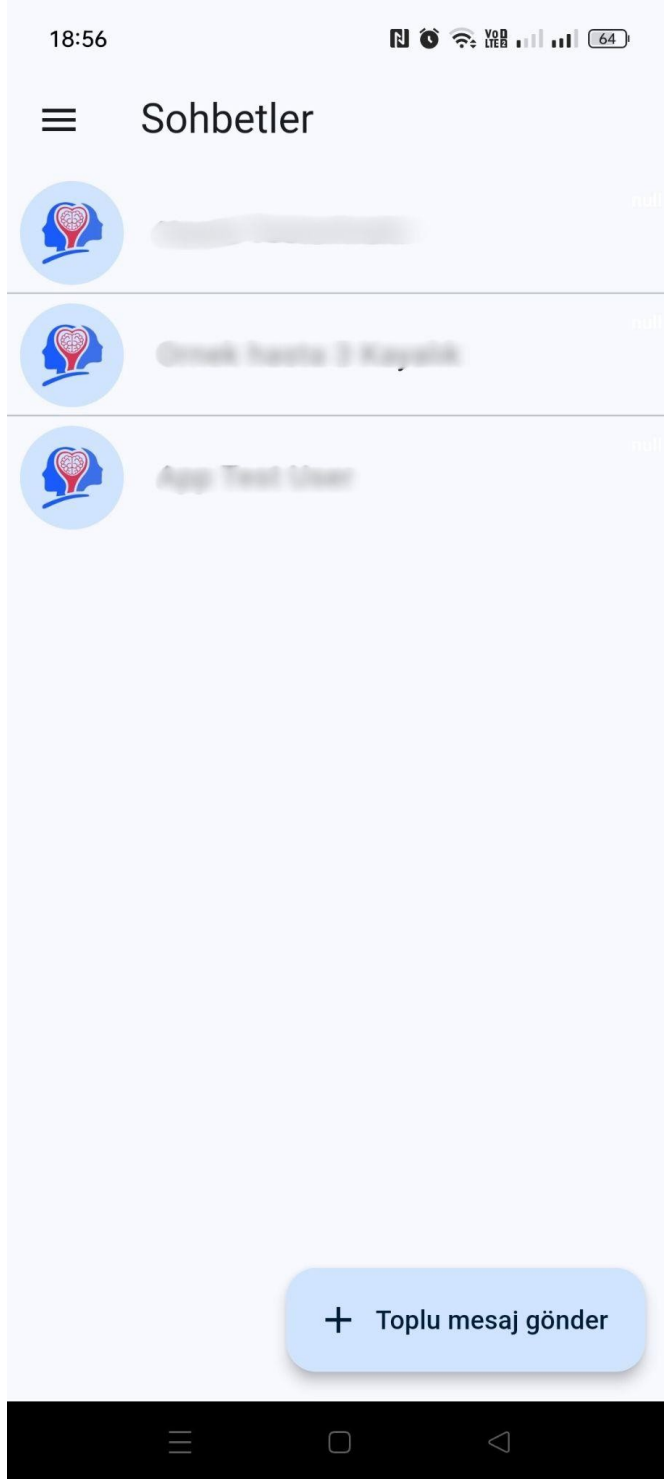

18:56



← Toplu mesaj gönder

Rehberde ara



[Redacted contact name]



Ornek Hastas 3 Kayalik



App Test User



Mesajınızı yazın

➤ Gönder



18:56



← Toplu mesaj gönder

Rehberde ara



[Redacted contact name]



Ornek Hastas 3 Kayalik



App Test User

Mesajınızı yazın

➤ Gönder



10-) Ayarlar:

- Bildirim alma ve dil seçimi ayarları yapılabilir.



11-) Sorun Bildir :

- İlgili sorunlar, “Sorun Bildir” ekranı üzerinden iletilebilir.

14:15

 91



Sorun Bildir

Konu

Ekran Görüntüsü (Opsiyonel)



Bildiri Detayı

Bildir