



Tedis Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu

Hekim

Oluřturulma tarihi: 2026-08-01

İçindekiler

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Giriş Ekranı | 12. İlaç Programı |
| 2. Bugün — Ölçüm Bekleyen Hastalar | 13. Cihazlar |
| 3. Menü — Hasta Seçilmeden Önce | 14. Bekleyen Uyarılar |
| 4. Hasta Seç | 15. Uyarı Detayı |
| 5. Menü — Hasta Seçiliyken | 16. Warfarin Doz Ayarlama |
| 6. Bugün — Seçili Hastanın Özeti | 17. Sohbetler |
| 7. Gözlemler | 18. Sohbet Detayı |
| 8. Gözlem Formu | 19. Ayarlar |
| 9. Görsel Kaynak Seçimi | 20. Sorun Bildir |
| 10. Warfarin | 21. Hakkında |
| 11. Haftalık Doz Şeması Detayı | |

ADIM 1

Giriş Ekranı

Tedis mobil uygulamasını açtığınızda karşınıza çıkan ilk ekrandır. Kurumunuzdan aldığınız kullanıcı adı (e-posta) ve şifre ile giriş yaparsınız. "Şifremi Unuttum" bağlantısı, şifrenizi e-posta üzerinden sıfırlamanızı sağlar. Uygulama ilk açılışta her zaman Türkçe gelir; dili daha sonra Ayarlar ekranından değiştirebilirsiniz.



Giriş Yap

[Şifremi unuttum](#)

v260705.0.0 (260705)

ADIM 2

Bugün — Ölçüm Bekleyen Hastalar

Hekim olarak giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ilk ekran, herhangi bir hasta seçmeden önce "bugün ve yarın" ölçüm/kontrolü gelen hastalarınızın iş listesidir. Liste, aktif warfarin kaydında kontrol tarihi bugüne denk gelen veya gözlem programında bugün ölçüm günü olan hastaları otomatik toplar — elle bir şey işaretlemeniz gerekmez. "Başka hasta ara" ile bu listede olmayan bir hastaya da doğrudan gidebilirsiniz.



ADIM 3

Menü — Hasta Seçilmeden Önce

Sol üstteki hamburger simgesine dokununca açılan yan menüde, henüz bir hasta seçmediğiniz için üstte "Hasta seç" butonu görünür. Bu menü, uygulamanın tüm bölümlerine (Bekleyen Uyarılar, Gözlemler, Warfarin, İlaç Programı, Cihazlar, Ayarlar, Sorun Bildir, Hakkında) tek yerden erişim sağlar.

≡

Profil Detayları

Adı

App Test

Soyadı

Doctor

Kurum

TEST KURUMU

E-posta

doctor.test@example.com

Seçili hasta

Hasta seçilmedi

Hasta seç

Bugün

Gözlemler


Warfarin

Sohbetler

ADIM 4

Hasta Seç

"Hasta seç" ekranı, kurumunuzdaki hastalar arasında isim veya e-posta ile arama yapmanızı sağlar. Bir hastaya dokunduğunuzda, uygulamanın Gözlemler/Warfarin/İlaç Programı/Cihazlar sekmeleri o hastaya göre içerik gösterecek şekilde "seçili hasta" olarak ayarlanır — bu seçim siz değiştirene kadar uygulama genelinde geçerli kalır.

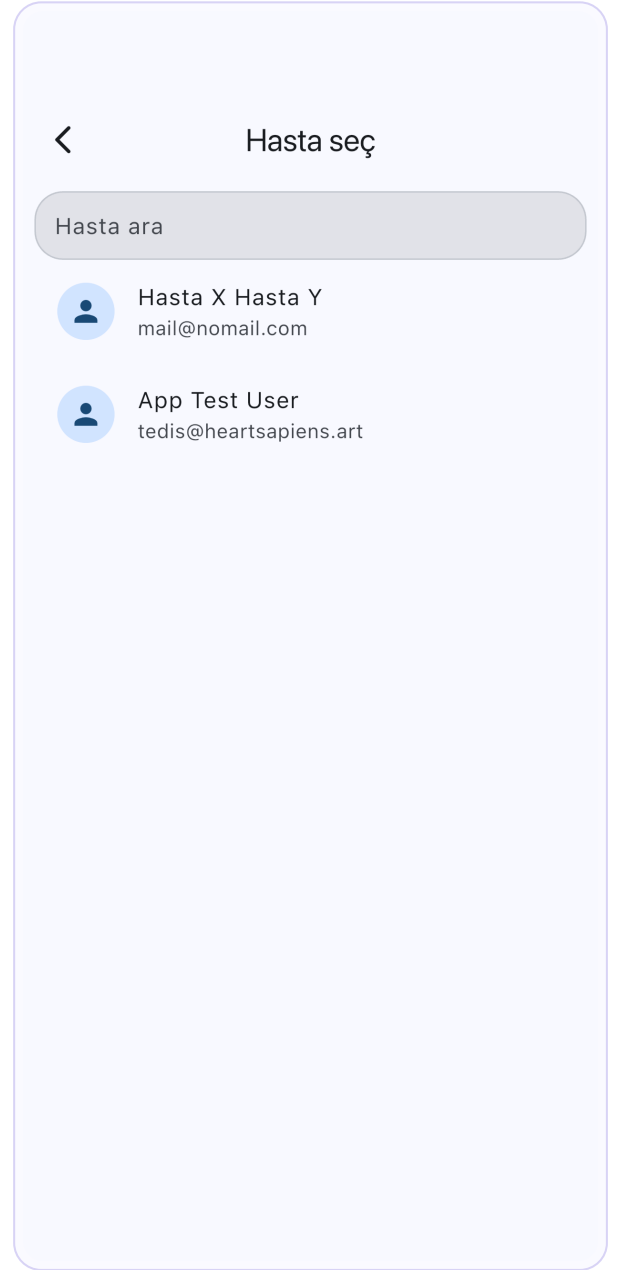

ADIM 5

Menü — Hasta Seçiliyken

Bir hasta seçildikten sonra yan menünün üst kısmı artık o hastanın adını ve profiline hızlı erişimi gösterir. Menüdeki diğer tüm sekmeler (Gözlemler, Warfarin, İlaç Programı, Cihazlar) otomatik olarak bu hastanın verilerine döner.

☰

Profil Detayları

Adı

App Test

Soyadı

Doctor

Kurum

TEST KURUMU

E-posta

doctor.test@example.com

Seçili hasta

Hasta X Hasta Y

🔍 Hasta seç

📅

Bugün

📄

Gözlemler

👤

Warfarin

💬

Sohbetler

ADIM 6

Bugün — Seçili Hastanın Özeti

Bir hasta seçildikten sonra "Bugün" sekmesi iş listesinden hastanın kişisel özet ekranına döner: son INR değeri ve tarihi, bir sonraki kontrol tarihi ve bugün alınması gereken ilaçlar (varsa hekim notuyla birlikte). Bu görünüm, hastanın mobil uygulamada gördüğü ekranla birebir aynıdır — hekim, hastanın günlük deneyimini doğrudan görebilir.

☰

Bugün

 Hasta X Hasta Y

☰ Listeye dön

Son INR

4.20

01.08.2026

Sonraki kontrol

 —

Bugünkü İlaçlar

WARFMADİN 10 MG TABLET, 28 ADET
1.0 mg · Akşam, yemekten sonra (tok karnına) alınır. ⌚

Hasta X Hasta Y ⚠

 Bugün

 Gözlemler

 Warfarin

 Sohbetler

ADIM 7

Gözlemler

Seçili hastanın INR, kilo, tansiyon, VAD cihaz parametreleri (WATT/DEBİ/RPM/PI) gibi tüm gözlem kayıtlarını zaman sırasına göre listeler. Bir kayda dokunarak detayına inebilir, sağ alttaki "Gözlem Ekle" butonuyla hasta adına yeni bir ölçüm girebilirsiniz — örneğin hasta klinikte iken ölçülen bir değeri hekim burada kaydedebilir.

Gözlemler

Filtre

Filtreleme yapmak için dokununuz

Tür	Değer	Tarih
Gözlem yok		

+ Gözlem Ekle

Hasta X Hasta Y

Bugün

Gözlemler

Warfarin

Sohbetler

ADIM 8

Gözlem Formu

Yeni gözlem ekleme formu; hastanın cihaz konfigürasyonuna göre ilgili alanlar (DEBİ/WATT/RPM/PI gibi VAD parametreleri, INR, tansiyon, kilo, boy) gösterilir. Aynı anda birden fazla alan doldurup tek seferde kaydedebilirsiniz. "Görsel Ekle" ile driveline (kablo çıkış yeri) fotoğrafı da gözlemle birlikte eklenebilir.

<

Gözlem Formu

DEBİ

WATT

RPM

PI

INR

SİSTOLİK BASINÇ

DİASTOLİK BASINÇ

KİLO

BOY

 Görsel Ekle

 Kaydet

ADIM 9

Görsel Kaynak Seçimi

"Görsel Ekle" butonuna basıldığında açılan seçim penceresi; fotoğrafı doğrudan kamerayla çekmek veya galeriden seçmek arasında karar vermenizi sağlar. Galeriden seçim öncesi, netlik/bulanıklık konusunda kullanıcıyı uyaran bir onay adımı da bulunur.

Gözlem Formu

DEBİ

WATT

RPM

PI

INR

SİSTOLİK BASINÇ

DİASTOLİK BASINÇ

KİLO

BOY

Görsel Ekle

Kamera

Galeri

ADIM 10

Warfarin

Seçili hastanın aktif warfarin planını gösterir: ilaç adı, haftalık doz dağılımı (Pazartesi-Pazar), hedef INR aralığı ve bir sonraki kontrol tarihi. Haftalık doz şeridine dokunarak günlük dağılımın detayını (hangi gün ne kadar, "ALMAYIN" olarak işaretli günler dahil) büyük görünümde inceleyebilirsiniz.

Warfarin Tedavisi

<

Ağustos 2026

2 Hafta

>

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Tedavi Listesi

i

 Akşam, yemekten sonra (tok karnına) alınız.

WARFMADİN 10 MG TABLET, 28 ADET
1.0 mg

Haftalık Doz Şeması

Haftalık Toplam: 7 mg

PZT	SAL	ÇAR	PER	CUM	CTS	PZR
1	1	1	1	1	1	1

Hasta X Hasta Y

Bugün

Gözetimler


Warfarin

Sohbetler

ADIM 11

Haftalık Doz Şeması Detayı

Warfarin ekranındaki haftalık doz şeridine dokunulduğunda açılan alt sayfa; haftanın her günü için planlanan dozu (mg ve tablet adedi olarak) ve haftalık toplamı ayrı ayrı gösterir. Bugünün günü vurgulanarak öne çıkarılır, doz almaması gereken günler "ALMAYIN" etiketiyle belirtilir.

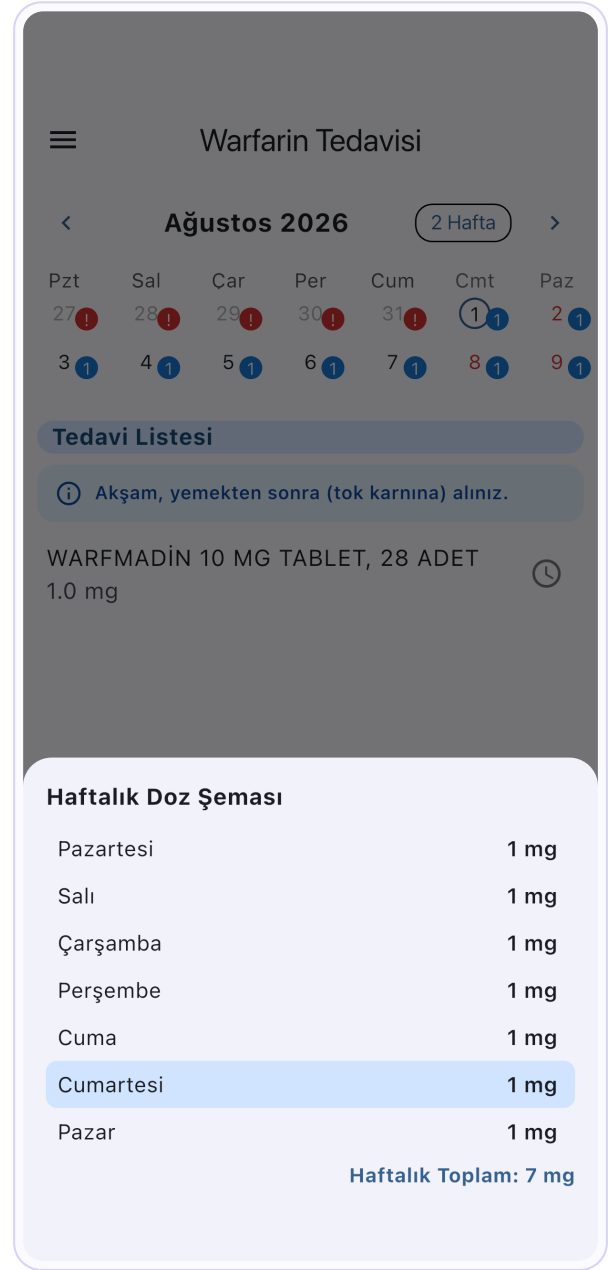

ADIM 12

İlaç Programı

Warfarin dışındaki daimi ilaçların (tansiyon, kalp yetmezliği ilaçları vb.) tekrar planını ve hastanın mobil üzerinden "aldım" olarak işaretlediği alım geçmişini gösterir. Bu ekran, hastanın günlük ilaç uyumunu hekimin uzaktan takip edebilmesi için tasarlanmıştır.

İlaç Programı

<

Ağustos 2026

2 Hafta

>

Pzt	Sal	Car	Per	Cum	Cmt	Paz
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Tedavi Listesi

Hasta X Hasta Y

Bugün

Gözetimler

Warfarin

Sohbetler

ADIM 13

Cihazlar

Hastaya takılı VAD cihazlarının (tip, seri no, konum, kayıt tarihi) listesidir — web arayüzündeki Cihazlar sekmesinin mobil karşılığıdır, hekimin hastanın cihaz geçmişini sahada da görebilmesini sağlar.

☰

Cihazlar

Sol

Aktif

📱

HEARTMATE III
HEARTMATE 3

#

111111
Seri No

📅

31/3/2026
Cihaz Takılma Zamanı

🕒

123 Gün
Cihaz Takılı Kalma Süresi

📄

Örnek Açıklama Denemesi
Açıklama

Hasta X Hasta Y

⚠️

📅

Bugün

📊

Gözlemler

👤

Warfarin

💬

Sohbetler

ADIM 14

Bekleyen Uyarılar

Yan menüden erişilen bu ekran, kurumunuzdaki tüm hastalar için henüz işlenmemiş klinik uyarıları (aralık-dışı gözlem değerleri veya kaçan warfarin dozları) listeler. Bildirim tepsisinden kaydırılıp kaybolan bir uyarıya daha sonra buradan geri dönebilirsiniz — bu, kalıcı bir gelen kutusu görevi görür.



Bekleyen Uyarılar



Hasta X Hasta Y
Kaçan Doz — 1.0 mg

31.07.2026



Hasta X Hasta Y
Kaçan Doz — 1.0 mg

30.07.2026



Hasta X Hasta Y
INR

01.08.2026 12:15:42

ADIM 15

Uyarı Detayı

Bir uyarıya dokunulduğunda açılan detay ekranı; hasta adı, uyarı tipi (gözlem veya kaçan doz), tetiklenen değer/tarih ve sorumlu hekim(ler) bilgisini gösterir. Alttaki buton ile uyarıyı "İşlendi" olarak işaretleyerek listeden kaldırabilirsiniz — bu, hastayı değerlendirip gerekli aksiyonu aldığınızı kaydeder.

<

Uyarı Detayı

⚠ Bekliyor

Hasta	Hasta X Hasta Y
Gözlem tipi	INR
Aralık	(val < 1.8 val > 3.5)
Sorumlu	App Test Doctor / Mock Sorumlu

📄 Warfarin Doz Ayarlama

✅ İşlendi Olarak İşaretle

ADIM 16

Warfarin Doz Ayarlama

INR tipi bir uyarının detayında, güncel INR aralık dışındaysa bu ekrana geçebilirsiniz. Sistem güncel INR'ye ve aktif kanama/morarma bilgisine göre yeni bir haftalık doz önerisi hesaplar (yüzde değişim ve hangi günlerin atlanacağı dahil), ancak son kararı her zaman hekim verir: "Onayla" öneriyi olduğu gibi uygular, "Değiştir & Onayla" ile öneriyi elle düzenleyebilirsiniz. Uygulama hiçbir zaman hekim onayı olmadan dozu kesinleştirmez.



Warfarin Doz Ayarlama

Hasta X Hasta Y

INR

Hedef INR Aralığı

4.2

2.00-3.00



Aktif Kanama / Morarma

INR ölçümü sırasında aktif kanama veya morarma var mıydı?

INR yüksek. Haftalık doz azaltılıyor.

Mevcut: 7 mg/hafta Yeni: 6.25 mg/hafta (-10.7%)

ALMAYIN x 1 (Atlanan gün)

Yeni Haftalık Program

PZT	SAL	ÇAR	PER	CUM	CTS	PZR	Haftalık Toplam
ALMAYIN	1.25	1.25	1.25	ALMAYIN	1.25	1.25	6.25

Sonraki Kontrol: 2026-08-08


Onayla

Değiştir & Onayla

ADIM 17

Sohbetler

Kurumunuzdaki hastalarla birebir yazıřabileceėiniz sohbet listesidir. Her satır bir hastayı temsil eder; dokunduėunuzda o hastayla olan mesaj gemiři aılır. Saė alttaki buton ile aynı anda birden fazla hastaya toplu mesaj da gnderebilirsiniz.

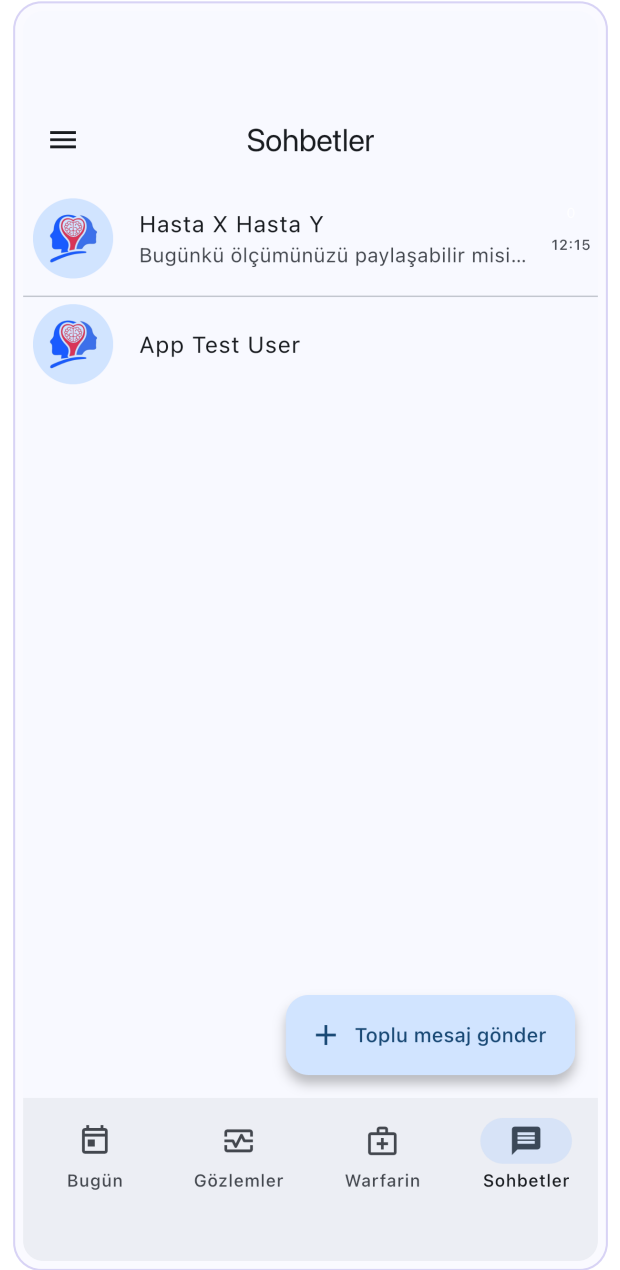

ADIM 18

Sohbet Detayı

Seilen hastayla birebir mesajlaşma ekranı; alt kısımdaki metin kutusuna yazıp gönder simgesine dokunarak mesaj gönderebilirsiniz. Bu kanal, klinik açıdan acil olmayan kısa bilgilendirme ve hatırlatmalar için kullanılır.

 Hasta X Hasta Y

Mesajınızı yazın



ADIM 19

Ayarlar

Anlık bildirimleri açıp kapatabileceğiniz, uygulama dilini (8 dil desteklenir) ve temayı (Açık/Koyu/Sistem) seçebileceğiniz ekrandır. En altta uygulamanın sürüm numarası görünür — destek talebinde bu bilgiyi paylaşmanız faydalı olur.



ADIM 20

Sorun Bildir

Uygulamada karşılaştığınız bir sorunu doğrudan geliştirme ekibine iletebileceğiniz formdur. Konu ve detay yazabilir, isteğe bağlı olarak bir ekran görüntüsü ekleyebilirsiniz — bu, sorunun daha hızlı teşhis edilmesini sağlar.

☰

Sorun Bildir

Konu

Ekran Görüntüsü (Opsiyonel) 

Bildiri Detayı

Bildir

 Bugün

 Gözlemler

 Warfarin

 Sohbetler

ADIM 21

Hakkında

Uygulamanın sürüm bilgisini, geliştirici firma bilgisini ve destek/iletişim kanallarını (e-posta, web sitesi) gösteren ekrandır.



Hakkında



Tedis

v260705.0.0 (260705)

Heartsapiens Medikal Teknoloji A.Ş

Destek: info@heartsapiens.art

Web sitesi: <https://heartsapiens.com/tedis/index.html>

© 2026 Heartsapiens Medikal Teknoloji A.Ş